

Aandachtspunten bij het gebruik van de Safe-Point Naaldenverwijderaar

Geachte gebruiker,

Naast de bijgaande gebruiksaanwijzing voor de Safe-Point Naaldenverwijderaar vragen wij uw speciale aandacht voor het volgende:

Indien de naalden te strak op de spuit worden aangedraaid heeft de Safe-Point Naaldenverwijderaar moeite met afkoppelen.

- ⚠ Draai de naalden niet te strak aan op de spuit.



De Safe-Point naaldenverwijderaar is goedgekeurd voor gebruik van de volgende naalden:

- Heraeus Kulzer – Carpule
- Davis – Solo Supra
- Henry Schein – Round
- Kent Express – Round
- Shinhung
- Sultan – 1 Shot
- Septodont – Septoject and Septoject XL
- Terumo
- Pegasus - H-Dent
- Minerva – Codent

- ⚠ De Safe-Point naaldenverwijderaar is niet geschikt voor het luer lock mechanisme.

De naaldenopvangcontainers zijn in beginsel gemaakt om eenmalig op de naaldenverwijderaar te koppelen. Bij het ontkoppelen van de opvangcontainer kan het zijn dat de bevestigingsclips afbreken. Dit is geen probleem wanneer de container vol is. Deze container zal immers worden vernietigd. Is de container nog leeg dan kunt u deze omruilen. Zodra de container naalden bevat en niet meer kan worden bevestigd, dient de container definitief te worden gesloten en te worden vernietigd.

- ⚠ Vermijd het tussentijds loskoppelen van de naaldenopvangcontainer.



De Safe Point naaldenverwijderaar en de naaldenopvangcontainers kunnen uitsluitend worden gekoppeld indien de opvangcontainer in de gesloten stand staat.

- ⚠ Sluit de naaldencontainer voor het koppelen met de Safe-Point Naaldenverwijderaar.
- ⚠ De schuif naar de gesloten stand draaien maar **niet** door de vergrendeling drukken.

Voor een demonstratie van het gebruik van de Safe-Point Naaldenverwijderaar verwijzen wij naar het volgende filmpje op Youtube van producent Frontier Medical.

www.youtube.com/watch?v=ruFOq1sMPMc